



パルス式家庭用超短波治療器

ひまわりSUN2デュオ

家庭用超短波治療器 ひまわりSUN2デュオ
管理医療機器 医療機器認証番号21700BZZ00095000

メーカー希望小売価格 649,000円(税抜 590,000円)

主な仕様

定格電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	165W
周波数	27.12MHz
本体寸法 (mm)	180 (幅) × 385 (奥行き) × 435 (高さ)
本体重量	約 7.0kg



- | | | | |
|--------------------------------------|----|---------------|---------------------|
| ① オレンジ導子〈Sひまわり〉(導子カバー・装着ベルト〈L・AW〉付き) | 2個 | ① ピンク導子〈肩〉 | 19,800円(税抜 18,000円) |
| ② ピンク導子〈Sひまわり〉(導子カバー付き) | 1個 | ② ピンク導子〈S・関節〉 | 16,500円(税抜 15,000円) |
| ③ 装着ベルト〈L〉 | 2本 | | |
| ④ 付属品収納袋 | 1枚 | | |

<p>禁忌</p> <p>併用禁忌</p>	<p>次のような人及び部位には、使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害による知覚障害のある人 ● 重度な血行障害のある部位 ● 中程度以上の重い浮腫のある部位 ● 血友病などの出血性素因の高い人 ● 温度感覚喪失が認められる人 ● 金属製物質(人工骨頭、埋没くぎ、金属製クリップなど)やプラスチックなどを体内に植え込んだ部位 ● 刺青及びその周辺部位・ラメ素材など化粧品が使用されている部位 	<ul style="list-style-type: none"> ● 出血部位または月経時の腹部 ● 乳幼児(6才以下) ● 男性生殖器 ● 適用部位の皮膚に異常(感染症、創傷など)のある人 ● 頭部(脳、目、耳など) ● その他、医師が不適当と認めた人
	<ul style="list-style-type: none"> ● ベースメーカー、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器とは同時に使用しないでください ● 心電計などの装着形の医用電気機器とは同時に使用しないでください 	<ul style="list-style-type: none"> ● 補聴器は外してください ● 他の医療機器や電気機器とは同時に使用しないでください



ITO Sports Project

物理療法機器メーカーのバイオニアとして、アスリートの活躍を応援しています。



イトスポーツプロジェクト 検索
<https://ito-sports-project.com/>

国際規格 ISO 認証取得

医療機器品質マネジメントシステム ISO 13485

伊藤超短波は常に信頼と共にあります。

1916年創業の伊藤超短波は、物理療法のバイオニアとして、常に進歩と革新に挑戦し続けています。



健康セミナー

効果的な治療法を学べます



お客様センター

機器の操作方法や治療法、その他のお問い合わせは

TEL.048-254-1019
FAX.048-254-1049

受付時間：平日10:00～17:30(土・日・祝日休み)

※担当者の不在などで、当日のご対応ができない場合もございます。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

お問い合わせ

製造販売元

伊藤超短波株式会社

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-8
TEL.048-254-1015
<https://www.itolator.co.jp/>

注) このカタログに掲載の記事、写真の無断転載を禁じます。全ての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。デザイン、仕様は改善のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

ひまわりSUN2デュオ

家庭用超短波治療器 ひまわりSUN2デュオ
管理医療機器 医療機器認証番号21700BZZ00095000

2ヶ所を同時治療
デュオだから
笑顔も2倍!



深部発熱で温め癒す
超短波エネルギー

“パルス&デュオシステム”で効果も使い方も充実。


デュオシステムと連続式の約3倍(ピーク値)の高出力を発振するパルス式を採用。「ひまわりSUN2デュオ」が短時間で効率よく治療し、治療効果を引き出します。

使用目的又は効果 ※一般家庭で使用すること

●超短波による局所の温熱効果

疲労回復／血行をよくする／筋肉の疲れをとる／筋肉のこりをほぐす／神経痛・筋肉痛の痛みの緩解／胃腸の働きを活発にする


異なる部位に効率よく

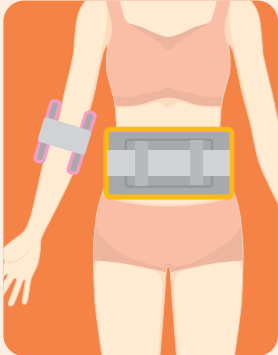

お腹は「コイル式」、ひじは「コンデンサー式」の2種類の導子を組み合わせることで、2つの部位を同時に心地よく温めることができます。



身体の深部から温める

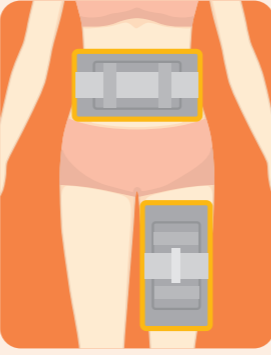


2つのコイル式導子を使用し、2ヶ所の部位を同時治療。血行をよくすることで、筋肉の疲れをとる、疲労を回復します。より短時間で効率よく治療効果を発揮します。

両膝を温める



超短波エネルギーが導子と導子の間を透過することで、穏やかに血行をよくし、神経痛や筋肉痛の痛みを緩解します。

関節を効率よく温める

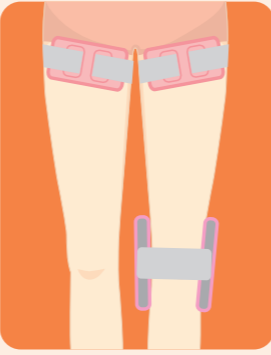

股関節や膝、足首などの関節は、血行をよくすることで神経痛や筋肉痛の痛みを緩解します。ぴったりフィットのピンク導子が効果を発揮します。

●超短波導子ご使用時の注意 実際の治療は服の上もしくはタオルをはさんで行ってください。

超短波とは

身体の深部で熱を発する超短波エネルギー

超短波は物理療法に利用される代表的なエネルギーの1つです。ごく波長の短い電波で、毎秒2700万回も振動します。超短波は体内の脂肪層や組織を透過する際、振動により細胞内外の水分子を回転させ、摩擦を起こして熱を発生させます。

身体の深部まで届き血行をよくする温熱効果

超短波は身体表面で吸収されることなく、脂肪や筋肉を通過して身体の深部まで到達します。治療部位の温度を4℃程上昇させ、優れた温熱効果を発揮します。

2つの導子を使った同時治療*のデュオシステムで治療効率が一段とアップ!

「2つの導子」で同時治療。短時間で効率的に

「肩+お腹」「膝+腰」「ひじ+肩」というように、2ヶ所の異なる部位を同時に治療できます。2つの導子を使って同時治療することで、短時間で効率よく治療効果を引き出します。

「コイル&コンデンサー」でより効果的な治療

コイル式とコンデンサー式の同時治療も実現。たとえば、「お腹」はコイル式、「足首」はコンデンサー式というように組み合わせることで、それぞれの部位に適した治療が行えます。


さまざまな部位に対応する、4種類の豊富な導子

肌触りがよく立体的な形状で身体にぴったりフィットする導子を採用。「肩にかける」「腰に巻く」など治療バリエーションが広がります。

オレンジ導子はコイル式

より深部にエネルギーを送り込む“コイル式”

- コイル式とは、体内に磁場を作り、そこでエネルギーを発生させる方式で、身体の深部まで到達します。
- エネルギーを吸収しやすい脂肪層より、さらに深い身体の内部に作用します。
- そのため脂肪層の奥にある胃腸の働きを活発にしたり、血行をよくします。

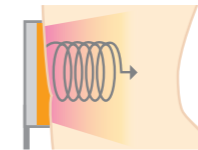

コイル式




オレンジ導子 (Sひまわり)

ピンク導子はコンデンサー式

患部をはさみ、2方向から治療する“コンデンサー式”

- コンデンサー式は治療部位を導子ではさんだり、並べたりして使います。
- 超短波エネルギーが導子と導子の間を透過、おだやかな温感で内部に浸透します。
- 脂肪層が薄い肩や膝、ひじなどの治療に適しています。

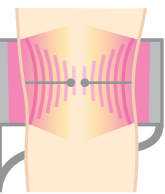

コンデンサー式



ピンク導子 (Sひまわり)



ピンク導子 (S関節)



ピンク導子 (肩)


効果をあげる工夫が充実

パルス式が約3倍の高出力を実現します。

- 「ひまわりSUN2デュオ」は、120W(ピーク値)の高出力を断続的に発振する“パルス式”を採用。連続式に比べ、約3倍の高出力でエネルギーを深部に伝えます。
- 温熱が高く、皮膚にダメージを与える恐れのある連続式に対し、“パルス発振”による皮膚温度の上昇は4℃程度。
- ソフトで快適な温熱効果により、充実した治療が行え、あらゆる部位の治療が行えます。

いっそう充実した超短波治療が行えます。

- デュオシステムにより、2ヶ所同時に治療が行えます。
- コイル式とコンデンサー式、2種類の超短波治療が行えます。
- 各部位の治療に適した付属導子、別売導子を豊富に用意しています。

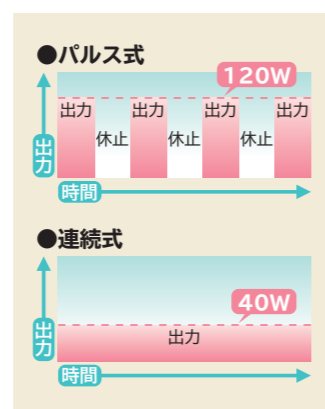

皮膚温度の上昇による身体への変化



*2つの導子を使用する場合は、交互出力となります。