

家庭用低周波治療器

メディボックス

Medi-Box

添付文書 取扱説明書

管理医療機器

家庭用低周波治療器 (JMDNコード:70986000)

メディボックス

医療機器認証番号：221AABZX00061000



目次

安全上のご注意	2
使用上のご注意	3
使用場所や状況について/準備について	4
使用中のご注意/使用後のご注意	6
充電池について	7
保守・点検のご注意	8
保管とお手入れについて	8
故障時及び取扱いに際しての注意事項	9
その他	9
付属品 本体・標準付属品/別売付属品	10
各部名称・仕様	11
使用前の準備	12
充電について	12
粘着パッドのセット	14
粘着パッドの剥がし方/保管について	16
操作方法	18
その他の機能	20
粘着パッドの貼り付け位置例	22
Q&A・故障かな?と思ったら	23

このたびは「メディボックス」をお買い求めいただき、ありがとうございました。

いつでもお読みいただけるよう、本器と取扱説明書を一緒に

大切に保管してください。

使用する前に必ず本取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくために

- 取扱説明書は本器を安全にお使いいただくために必要です。本器を人に貸したり、差し上げる時には点検を受けたうえで、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」と3ページから9ページまでの注意事項をよく読み、正しくお使いください。
- あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、下記のような絵表示をしています。危害や損害の程度を表していますので、内容を理解してから本文をお読みください。



危険

取扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示します。



警告

取扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

取扱いを誤ると、人が傷害を負う可能性または物的損害が想定される内容を示します。

表示例



は、本器の取扱いにおいて、発火、破裂、高温等に対する注意を喚起するための絵表示です。

※表示例は「感電注意」です。



は、本器の取扱いにおいて、その行為を禁止する絵表示です。

※表示例は「分解禁止」です。



は、本器の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する絵表示です。

※表示例は「プラグをコンセントから抜く」です。

この取扱説明書のイラストはイメージであり、実際とは異なる場合があります。

⚠ 危険 下記のような医用電気機器との併用は、機器に誤作動をまねく恐れがありますので使用しないでください。

- ペースメーカー、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器とは同時に使用しないでください。
- 心電計などの装着型の医用電気機器とは同時に使用しないでください。
- 他の医療機器や電気機器とは同時に使用しないでください。


⚠ 警告 次のような人及び部位は必ず医師とご相談の上、使用してください。






- ^{せきつい}脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなど、急性（疼痛性）疾患の人
- 悪性腫瘍のある人
- 心臓に障害がある人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 重度な血行障害のある部位
- 血友病などの出血性素因の高い人
- 静脈怒張の皮膚表面
- 萎縮性拘縮を起こしている皮膚表面
- 頭部（脳、目、耳等）
- 頸動脈洞上
- 病名などがはっきりしない人
- 安静を必要とする人
- 血管障害の恐れのある血圧異常の人
- 妊産婦（産前産後を含む）
- 熱の高い人（38℃以上）
- アトピー性皮膚炎の人
- 日焼けなどで皮膚に炎症を起こしている部位
- 皮膚が化膿し、炎症を起こしている部位
- アレルギー体質で、特にお肌が敏感な人
- カユミやホテリのあるシミや病的なシミのある人
- 適用部位の皮膚に損傷・炎症、その他の異常のある人
- 適用部位に知覚障害のある人
- その他、医師の治療を受けている人や体に異常を感じている人、また医師が不相当と認めた人

使用上のご注意

使用場所や状況について



 **危険** 浴室などの湿度の高い所では使用しないでください。

 **警告** 感電、火傷や発火などの事故や物的損害、または故障の原因となります。














-  1) 台所、車の中、火気の近く、直射日光の当たる場所など、温度の高い場所やほこりの多い場所で使用したり、保管しないでください。本器の寿命を縮めたり、暑さによる変形など故障の原因となります。
-  2) 本体を寒い場所から温かい場所に移動した直後に使用しないでください。本体内部で結露現象が生じる恐れがあります。この状態で使用すると表示部の誤動作や故障の原因となります。使用する時は移動後2時間以上経過してから電源を入れてください。
-  3) トイレでの使用は、落下や水没などのおそれが生じ、事故や故障の原因となりますので、絶対に使用しないでください。
-  4) 保護者、医師又は専門家の監督下以外では、子供に使用させないでください。また、子供が機器本体及び導子で遊んだり、上に乗ったりしないようにしてください。
-  5) 使用しても効果が現れない場合は、医師又は専門家に相談してください。

準備について

 **危険**













-  1) 他の機器との併用は、危険を起こす恐れがあるので、行なわないでください。本器および接続コードを身につけている場合、超短波・高周波など、他の治療器は絶対に使用しないでください。
-  2) 濡れた手での操作は、感電する可能性があり非常に危険です。絶対におやめください。

 **警告** 使用を開始するにあたり、禁忌事項及び以下のことに注意してください。





- 1) 次の人は介護者の監視のもとでご使用ください。
 - マヒのある人
 - 寝たきりの人
 - 12才以下の子供
 - 認知症の人や意思表示ができない人
 - 睡眠薬を飲んだ人
 - 胸部近辺
 - 適用部位に浮腫がある人
 - 適用部位に阻血組織がある人
 - 自分で操作できない人
 - 皮膚知覚が低下している人や部位
-  2) 口中・陰部などには、使用しないでください。けがなどの原因となります。
-  3) 頸動脈（咽喉部）、頭部（脳、目、耳等）、心臓の前後に挟んで使用しないでください。
-  4) 正常な判断ができない状態（お酒を飲んだ人、睡眠薬を飲んだ人）で使用しないでください。
-  5) 本来の目的以外には、絶対使用しないでください。故障や事故の原因となります。また、ペットへは使用しないでください。
-  6) 粘着パッドは金属製の物（ネックレス、ベルト、時計など）と重なったり、触れたりしないように貼ってください。また、粘着パッドが互いに重ならないように貼ってください。
-  7) 接続コードには金属を近づけたり、他の電気のコードと交わったりしないようにしてください。感電、発火の原因となったり他の電気製品に異常を起こしたりなどの恐れがあります。
-  8) 車の運転中は危険ですので絶対に使用しないでください。
-  9) 使用前にスイッチ等を操作し、本体と付属品が正常かつ安全に作動するか確認してください。
-  10) 定められた手順で操作してください。操作を誤ると事故や故障の原因となります。
-  11) 全ての接続コードは容易に離脱しないように正しく確実に接続してください。発火やショートなどの原因となります。
-  12) 高周波を利用した家電製品（テレビ、電子レンジ、ラジカセなど）を使用している場合は、3メートル以上離れてご使用ください。近くで使用すると誤作動の原因となることがあります。
-  13) 使用にあたって体調の優れないときは使用を控えてください。
-  14) 火気、熱湯、高温状態にある器具を扱う炊事中は危険ですので使用しないでください。

使用上のご注意

使用中のご注意

-  1) 粘着パッドは正しく装着してください。
-  2) 機体に故障が発見された場合は、使用を直ちに中止し、電源を切ってください。
-  3) 本体を使用した際に、身体に異常を感じたり、発疹・発赤・かゆみ等が現れた時は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。症状が悪くなる場合があります。
-  4) 治療目的にあった治療時間・量を超えないように注意してください。
-  5) 粘着パッドを貼った部分が赤くなったり、かゆみを引き起こした場合は、使用を中止して、医師に相談してください。
-  6) マイクロカレント（微弱電流）はほとんど体感はありませんが、使用中に粘着パッドを外すときは出力を止めて行ってください。
-  7) 出力口に金属製の棒やハサミ、ピンなどを差し込まないでください。感電・発火の原因となります。
-  8) 本体を水につけたり、濡らしたりしないでください。内部に水が入ると発火・ショートなどの事故や故障の原因となります。（本器を使用したままトイレに入らないでください）
-  9) お子様や認知症の方が、粘着パッド等の付属品を口に入れたり、他の用途に使わないよう十分に注意してください。事故や故障の原因になります。
-  10) 接続コードのプラグにゴミやほこりなどを付着させたまま使用しないでください。発火・ショートの原因となります。
-  11) 指定の充電器、充電電池以外は使用しないでください。事故や故障の原因となります。
-  12) 治療部位や症状、回数などは年齢や体調などにより個人差があります。取扱説明書をよくお読みになり、定められた使用時間を超えないようにしてください。不明な点はお求めの販売店に相談してください。

使用後のご注意

-  1) 使用後は、電源スイッチを切り接続コードを出力口から抜いてください。接続コード類の取外しに際しては、必ずプラグ部を持って引き抜いてください。
-  2) 本体、付属品などは、次回の使用に支障のないように清潔にし、湿気の少ない所に整理、保管してください。
-  3) 接続コードや粘着パッドは、無理に折り曲げたり、丸めたりしないでください。
-  4) 使用後、ウェットティッシュなどで、粘着パッド装着部の皮膚を清拭してください。

- ❗ 5) 使用后、体調に異常が感じられた場合は、しばらく使用を控えてください。
- 🚫 6) 接続コード類を本体に巻き付けた状態で放置しないでください。接続コードの接触不良や故障の原因となります。
- 🔌 7) 充電器を長時間で使用にならない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ❗ 8) 機器を衛生的に保つための清掃、予防点検及び保守に関しては、「保管とお手入れについて」を参照してください。

充電電池について

次のような場所では充電しないでください。

- 1) 周囲温度が5℃以下、または30℃以上になるところ（周囲温度が低すぎる、または高すぎると、充電されないことがあります。）
- 2) 湿気やほこり、振動の多いところ（充電不良の原因となります。）

必ず指定の充電電池をお使いください。

仕様：リチウムイオン充電電池、DC 3.7V、770mAh

お買い求めの際はお求めの販売店へご連絡ください。

充電について

- 1) 充電電池は消耗品です。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときは、新しい充電電池と交換してください。使用頻度により違いはありますが、約300回が目安です。
- 2) 充電電池は使わないで放置していても自己放電します。このため、新しい充電電池でもはじめから容量が少なくなっていたり、まったくないことがあります。これは、充電電池の不良ではありません。
- 3) はじめてお使いになる時は、充電してからお使いください。充電は約90分で完了します。
- 4) 充電のしすぎによって故障することはありません。
- 5) 雷や地震、停電時は、充電を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

充電電池の取扱いについて

分解しないでください。

ご使用後はリサイクルへ

- 1) 本製品の充電電池はリチウムイオン充電電池を使用しています。
- 2) リチウムイオン充電電池はリサイクル可能な資源です。不要になった電池は廃棄せず、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。
- 3) 不要になった充電電池を一般のゴミとして捨てないでください。
- 4) 環境への影響を少なくするため、お住まいの地域で定められている規則に従ってください。













リサイクル時のお願い

充電電池はショートしないように、+端子と-端子に絶縁テープを貼ってください。火災・感電の原因になります。

保守・点検のご注意

保管とお手入れについて 警告

-  1) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管してください。劣化を早め、故障・事故の原因となります。
-  2) 濡れた手でプラグの抜き差しをしないでください。感電などの事故の原因となります。
-  3) 本体の清掃は、変色の原因となるのでシンナー、ガソリン、灯油などの揮発油や磨き粉、熱湯、薬品類で拭かないでください。水かぬるま湯又は中性洗剤を含ませて、固く絞った布で拭いてください。
-  4) お子様の手の届かない所に保管してください。落としてけがや破損の原因となります。
-  5) 本体は絶対に開けないでください。故障の原因になります。
-  6) 粘着パッド、接続コード類は消耗品です。より安全にお使いいただくために、接続コード類は使用状態により異なりますが、遅くとも3年以内には交換してください。長年使用すると、接続コードの断線などで火傷・火災などの事故の原因となることもあります。粘着パッドは粘着力が弱まりましたら交換してください。
-  7) 事前のチェックや点検などで接続コード類に亀裂などの不具合が生じている時は、すぐ使用を中止してください。危険ですから、お求めの販売店までご連絡の上、新しいものをお求めください。
-  8) 接続コード類を傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っばったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物をのせたり、挟みこんだり、加工したりすると接続コードが破損し、火災・感電・事故の原因となります。
-  9) 他の機器の部品や付属品などを流用しないでください。規格や仕様が異なるため、事故や故障の原因となります。
-  10) 粘着パッドには、袋にパッドの使用期限を表示してあります。使用期限内に使い切るようにしてください。また、使用期限を過ぎたものは使用しないでください。

※使用期限は粘着パッドの表面下段のバーコードの側に表記されています。

例： 20XX-△△ → 使用期限は20XX年の△△月



11) 長時間で使用にならない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



12) 粘着パッドを貼った部分が赤くなったり、かゆみを引き起こした場合は、使用を中止して、医師に相談してください。



13) 本体及び付属品は、使用に際し正しく作動することを、日常的に点検してください。



14) 性能を維持し、安全に使用するため、定期的（1年を目安）にお求めの販売店に「定期点検」を依頼してください。



15) しばらく使用しなかった本器を再使用するときは、使用前に必ず本器が正常かつ安全に作動することを確認してください。また、6ヶ月以上使用しなかった場合は、使用前にお求めの販売店で点検を受けてください。スイッチなどを入れ、本体と付属品が正常かつ安全に作動するか確認してください。

故障時及び取扱いに際しての注意事項



1) 本体や付属品を勝手に修理したり、改造しないでください。故障かなと思ったら使用を中止し、お求めの販売店へお問合せください。



2) 本体を高い所から落としたり、強い衝撃を与えないでください。誤って落とした場合は必ず点検を受けてください。また、その時に異常がなくても内部の損傷が進み、後に事故や故障の原因になることがあります。

その他




本体及び付属品を廃棄する場合は、環境への影響を少なくするため、地域で定められている規則に従って処分してください。



3年以上使用した付属品（接続コード、充電器、リチウムイオン充電池）による事故については、当社は責任を負いかねる場合もありますので、予めご理解をお願いします。

付属品

本体・標準付属品

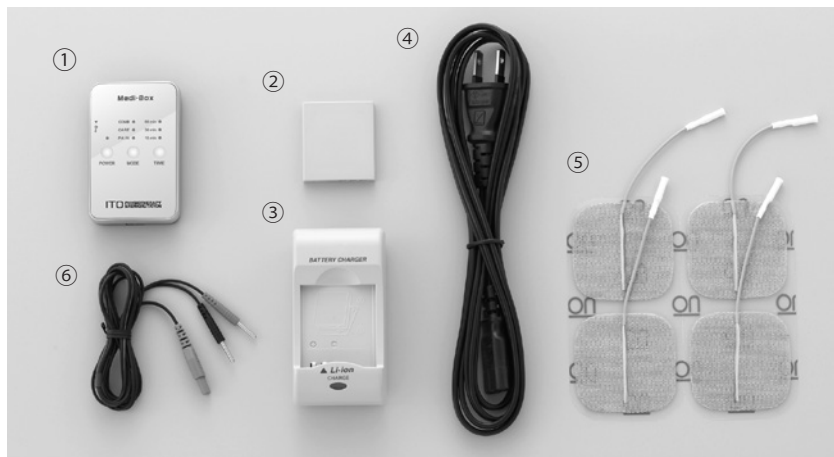

- ① 本体 1台
- ② リチウムイオン充電電池 1個
- ③ 充電器 1個
- ④ 充電器用電源コード 1本
- ⑤ 粘着パッド〈M・Aタイプ〉 1袋 (4枚)
- ⑥ 接続コード〈1.15m・黒〉 1本
- * 取扱説明書 1部

※付属品等に不足があった場合、お求めの販売店までご連絡ください。

※粘着パッドは消耗品です。粘着力が低下しましたら交換してください。


粘着パッドのご注文は、お求めの販売店にご連絡してください。

別売付属品

- 専用シリコンカバー (半透明) 1個



各部名称・仕様

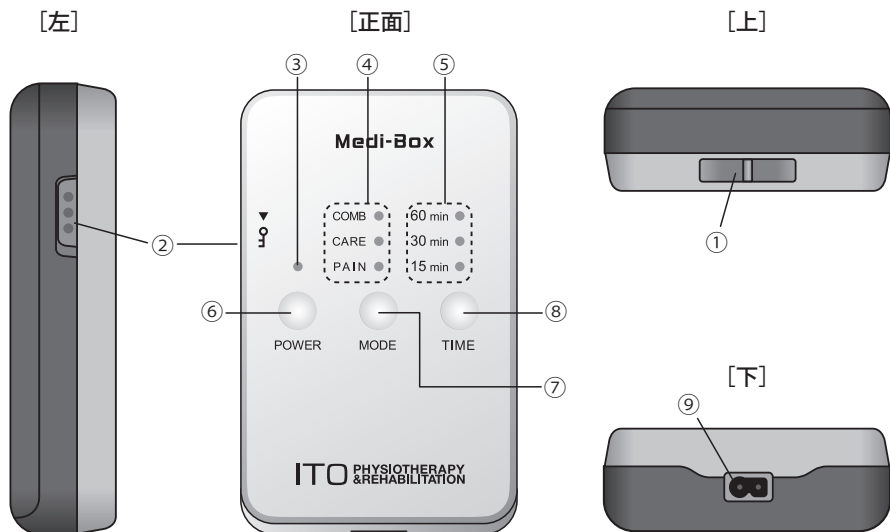

- | | | |
|-------------|-------------|------------|
| ① ストラップ通し口 | ④ MODE LED | ⑦ MODEスイッチ |
| ② キーロックスイッチ | ⑤ TIME LED | ⑧ TIMEスイッチ |
| ③ POWER LED | ⑥ POWERスイッチ | ⑨ 出力口 |

定格電源	本体：DC 3.7V 770mAh (リチウムイオン充電電池) 充電器：AC 100V、50/60Hz
定格消費電力	0.1W
出力電流	実効値 最大340 μ A \pm 20%
出力電圧	500 mV \pm 20% (ピーク電圧値、1K Ω 負荷)
出力周波数	0.2 ~ 400 Hz (duty 50%)
タイマー	最大1時間
本体寸法	(幅) 45mm \times (奥行き) 17mm \times (高さ) 70mm
重量	約50g (リチウムイオン充電電池含む)
使用目的又は効果	肩こりの緩解、麻痺した筋肉の萎縮の予防及び マッサージ効果。一般家庭で使用すること。

※ 充電器用電源コードは国内でのみご使用いただけます。


使用前の準備

はじめてお使いになる時は、
充電をしてお使いください。


充電について

ここで使うもの：本体・充電器・充電器用電源コード・リチウムイオン充電電池

- 1 充電器用電源コードのプラグを充電器に差し込みます。

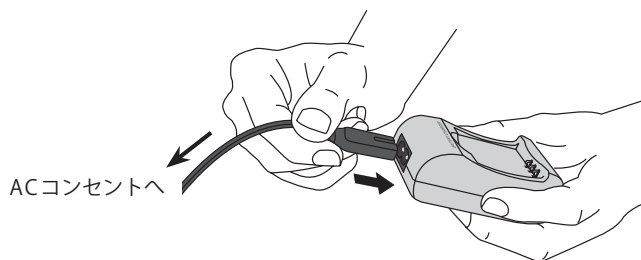


- 2 充電器用電源コードをACコンセントに差し込み、
リチウムイオン充電電池をセットします。

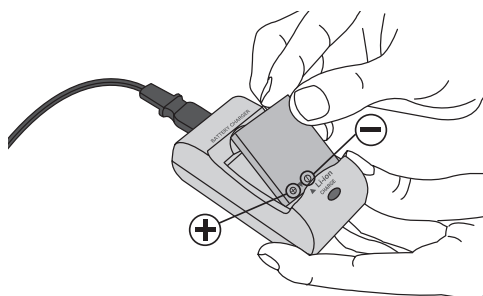


- 3** 充電中はCHARGEランプが赤色に点灯し、
充電が完了すると、CHARGEランプが消えます。

●充電は約90分で完了します。

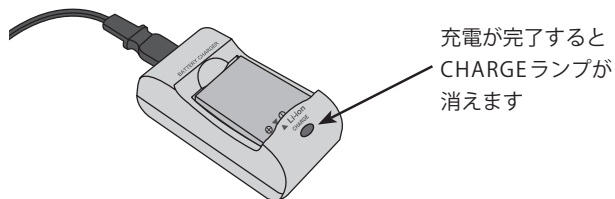

- 4** 本体裏面にリチウムイオン充電電池をセットしてください。

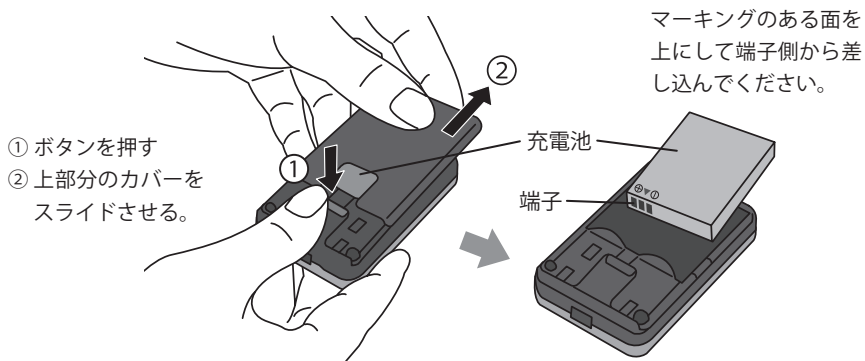

※ 本体、リチウムイオン充電電池、充電器それぞれの端子部分は、時々乾いた綿棒で清掃してください。端子が汚れていると接触不良が起こり、電源が入らないことや途中で切れることがあります。また、充電が不十分になることがあります。

充電電池のご注意とリサイクルについて → P7

使用前の準備

粘着パッドのセット


お使いになる前に、肌に粘着パッドが合うか
テストをしましょう。

- ① おなか・腕・太ももの内側など皮膚のやわらかい部分へ、粘着パッドを貼ってください。(パッドに接続コードを接続しない)
- ② 20分後、粘着パッドを貼っていた部分が赤くなったり、かゆみを引き起こした場合は、使用を中止して医師に相談してください。
- ③ 異常がないことをご確認のうえ、ご使用ください。

1 粘着パッドに接続コードを差し込み、粘着パッドを治療部位に装着してください。

粘着パッドに、接続コードの細い先端を
差し込んでください。

治療部位にしっかり貼り付けます。

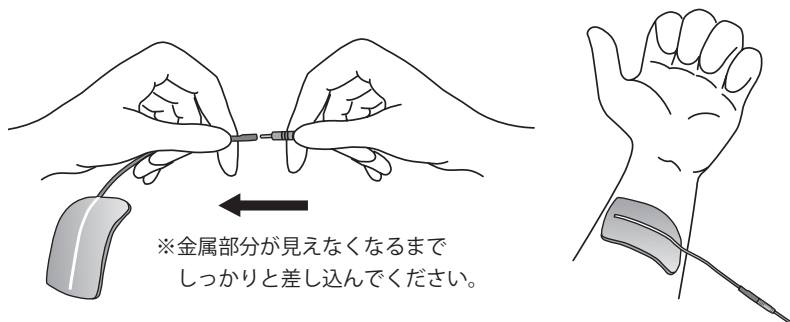


2 本体の出力口に接続コードを差し込んでください。



【ポケット等に入れる場合】


本体の出力口を上に向け、電極コードが折り曲がらないようにしてください。
断線を引き起こす原因となります。

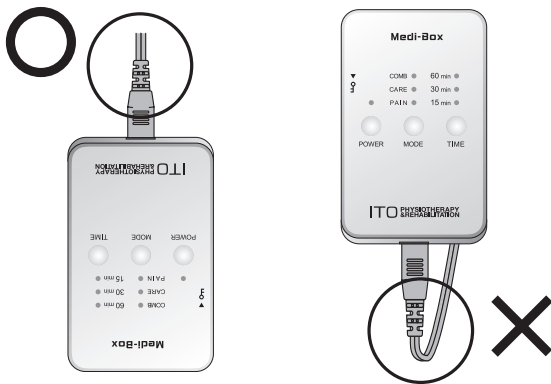

使用前の準備


粘着パッドの剥がし方

- 粘着パッドを透明フィルムや皮膚から剥がすときは、パッドの端を摘んでゆっくり持ち上げてください。接続コード部を持って剥がすようなことはしないでください。

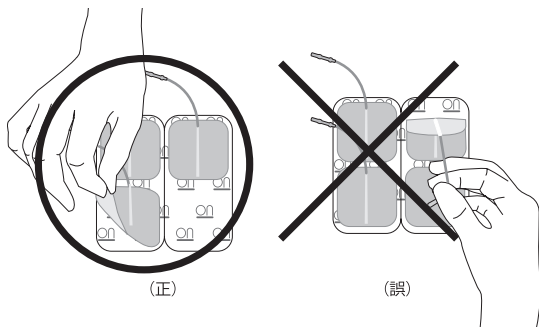

粘着パッドの保管について

- 粘着パッドは、乾燥してくると粘着力が低下します。粘着力が低下してきた場合、ご使用後に汚れや脂をとりのぞき、1～2滴の水をつけておくと長くお使いいただけます。
- 粘着パッドを保管する際には、透明フィルムの「ON」と読める面に貼ってください。「NO」と読める面に貼るとはがれにくく、粘着パッドの寿命を縮めます。

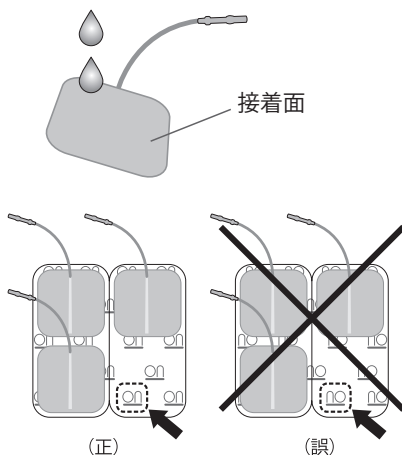

- 粘着パッドの使用後は、元の透明フィルムに戻し、袋に入れ、室温で保存してください。
- 粘着パッドの袋に使用期限が表示してあります。期限切れの粘着パッドは使用しないでください。
- 粘着パッドは消耗品です。粘着力が低下しましたら交換してください。

警告 粘着パッドについて

- 傷のある皮膚には使用しないでください。
- 湿布や絆創膏等の粘着物によりかぶれやすい方は注意してご使用ください。かぶれたり、赤くなったりすることがあります。
- 皮膚が荒れたり、火傷・炎症等をおこした際は直ちに使用を中止してください。
- 粘着パッドを透明フィルムや皮膚から剥がすときは、パッドの端を摘んでゆっくり持ち上げてください。コード部を持って剥がすようなことはしないでください。
- 皮膚にローション、オイルなど化粧品が残っている場合、粘着パッドが付きませんので皮膚を石鹸でよく洗い完全に乾かしてから貼り付けてください。
- 粘着パッドを貼り付ける際には、必ず皮膚に密着させてください。貼った部分に隙間があると刺激が強くなり痛みを感じ、場合によっては火傷等の皮膚障害をおこすおそれがあります。
- 粘着パッドを使用し際に、発疹・発赤・かゆみ等が現れたときは直ちに使用を中止し、販売元にご相談ください。
- 粘着パッドを使用する時、金属物（ネックレス、ベルト、時計など）と重なったり、触れたりしないよう注意して貼ってください。また、粘着パッドは互いに重ならないように貼ってください。
- 運動・温熱（ホットパックなど）により発汗し皮膚表面が濡れている場合は、汗を乾いたタオル等でふきとってから粘着パッドを装着してください。粘着パッドの上からホットパックなどで加温することは局所に熱が集中し火傷・炎症の可能性がありますので絶対におやめください。
- 使用中の粘着パッドを体の下に敷くなど、過度な力をかけますと、電流が一部分に集中し火傷・炎症の原因となりますので、絶対におやめください。
- 粘着パッドを皮膚から剥がすときは、必ず本体の電源スイッチを切ってください。
- 粘着パッドの使用後は元の透明フィルムに戻し袋に入れ、室温で保存してください。
- 粘着パッドの袋に使用期限が表示してあります。期限切れの粘着パッドは使用しないでください。
- 粘着パッドは消耗品です。粘着力が低下しましたら交換してください。
- 粘着力が弱くなった粘着パッドは、皮膚との接触状態により局所に電流が集中する可能性があり、火傷・炎症の原因となるので、絶対におやめください。
- 使用期限の切れたものや、粘着力が低下した粘着パッドをそのまま使用したり、テープ・バンド・下着等で固定して使用しても、適切な効果が得られないばかりでなく、急激に強い刺激がかかったり、場合によっては火傷等の皮膚障害をおこすおそれがありますので、絶対におやめください。
- 接続コードの接続ピン部分が汚れていないか必ず使用前に確認してください。汚れている場合は、ぬるま湯、アルコールで湿らせた柔らかい布で汚れをふき取ってください。汚れたままですと、接触不良による電流の急激な変化で、火傷・炎症のおそれがあります。また、接続部が緩くなった粘着パッドも接触不良を起こす可能性がありますので、新しいものに交換してください。

粘着パッドの模倣品に対するご注意

安全に製品をご使用いただくために、弊社で品質管理を実施しております純正の粘着パッドをご使用くださいますようお願い申し上げます。弊社では模倣品が原因で発生した火傷事故・故障・その他の不具合等につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。本件については〈お客様相談室〉までお問い合わせください。

〈お客様相談室〉 TEL : 03-3994-2433


受付：平日午前10時～午後4時30分（土・日・祝日休み）

操作方法

1 電源を入れる

POWERスイッチを長押し(約1秒)して、電源を入れてください。

※ キーロック中は電源が入りません (P20参照)

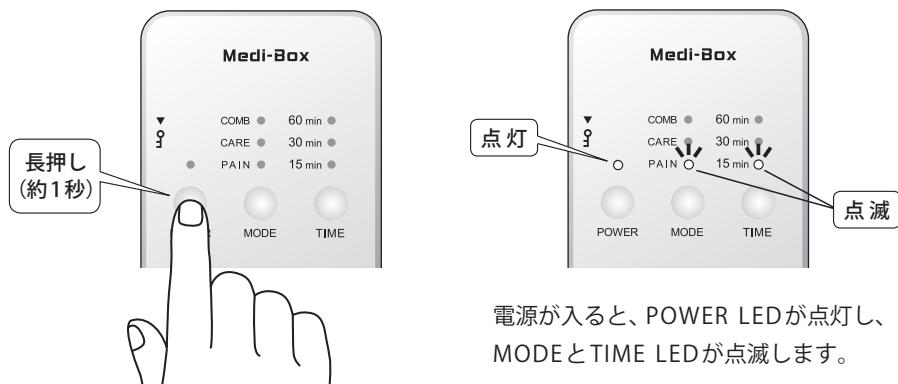


点灯：LEDが光り続けること
点滅：LEDがついたり消えたりすること

電源が入ると、POWER LEDが点灯し、
MODEとTIME LEDが点滅します。

※ 電源が入らない場合にはキーロック
の状態を確認してください。

2 モードを選択する

MODEスイッチを押すと、PAIN→CARE→COMB→PAIN…
の順にMODEが変わり、LEDが点灯します。

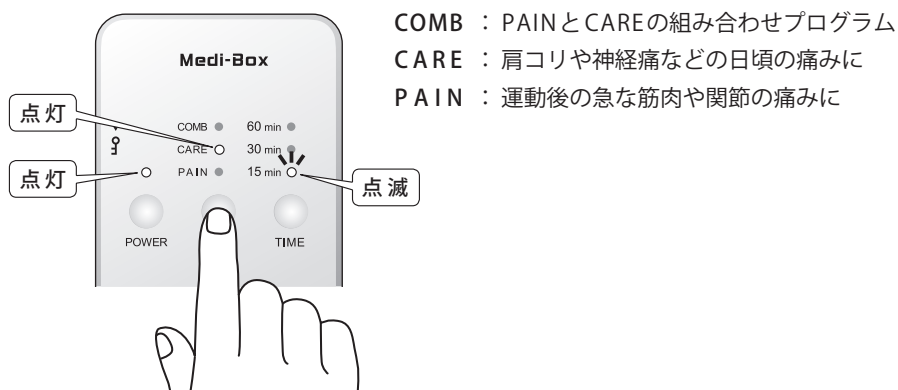

COMB：PAINとCAREの組み合わせプログラム


CARE：肩コリや神経痛などの日頃の痛みに

PAIN：運動後の急な筋肉や関節の痛みに

3 タイマーを選択する【出力の開始】

TIMEスイッチを押すと各MODEごとに決められた出力を開始します。※

続けてTIMEスイッチを押すと30min→60min→15min…の順にタイマーが変わります。

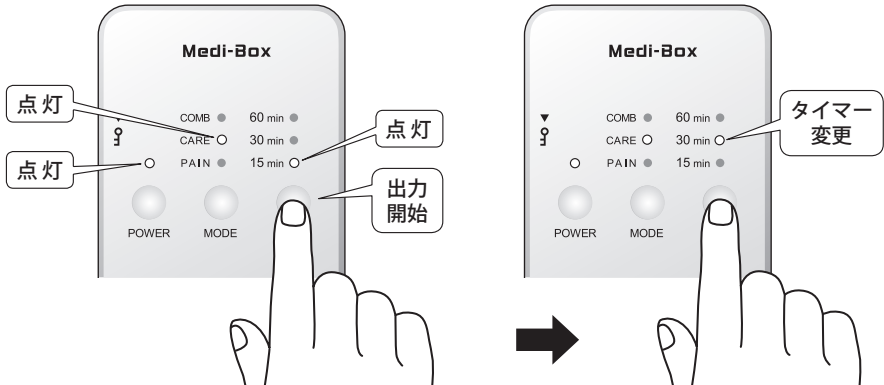

※本器は微弱な電流を使用しているため体感はほとんどありません

※治療残り時間とLED点灯について

60min ○：残り60～30分 30min ○：残り30～15分 15min ○：残り15分～終了

● 使用中にタイマー延長(変更)したい場合

TIMEスイッチを押すと、15分→30分→60分の順でタイマーが延長されます。

● 使用中にモードを変えたい場合

MODEスイッチを押す→MODEが切り替ります→TIME LEDが点滅します(※出力は停止されます)→TIMEスイッチを押してください→出力が開始されます。

4 終了 タイマーが終了すると自動的に電源がOFFになります。

? 途中で中断するには？ POWERスイッチを(1秒以上)長押しすると電源が切れます。※
※キーロック中は電源が切れません(P20参照)

その他の機能

1 キーロック機能

キーロックスイッチをONにすると
スイッチ操作を禁止できます。

※ キーロック中は電源のON・OFFが行えません。




2 省エネルギー機能

未出力中に3分間スイッチ操作をしないと、
自動的に電源がOFFになります。

3 充電残量チェック機能

MODEスイッチを長押し(約1秒)すると、
充電残量に応じてMODEの「COMB」～「PAIN」
のLEDが点滅します。

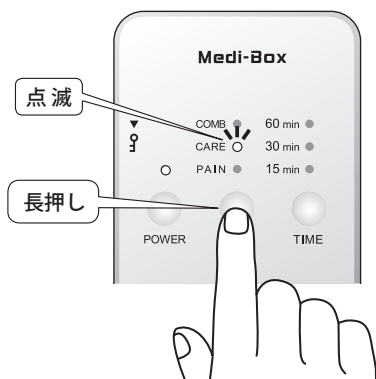


COMB = 満充電
CARE = 半分
PAIN = 残量少
MODE

※ 充電残量がなくなった場合、POWER、MODE、TIMEが10回点滅後、電源が切れます。

4 接続コード断線チェック機能


未出力中にTIMEスイッチを長押し(約2秒)すると、接続コードの断線チェックを行うことができます。

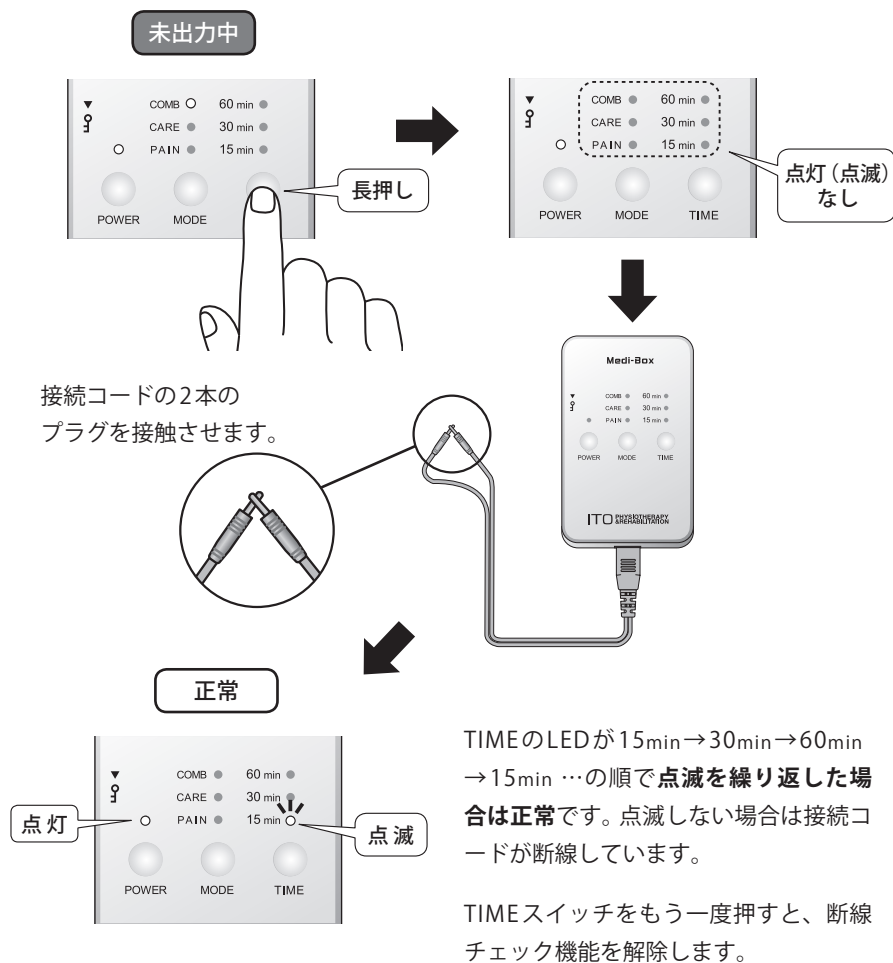


※粘着パッドを体につけた状態で接続コード断線チェックを行うとピリピリと刺激を感じることがあります。体につけた状態では行わないでください。

粘着パッドの貼り付け位置例


1
首

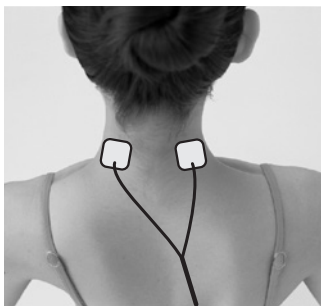


2
肩

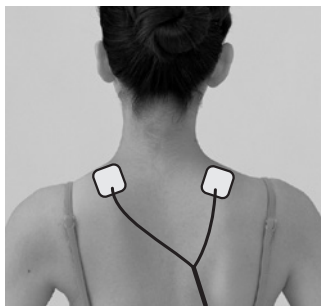

3
ひじ

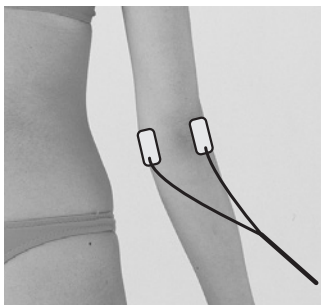

4
腰

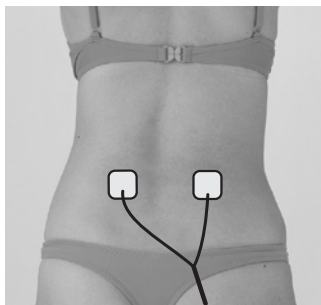


5
ひざ



6
足首



7
足底

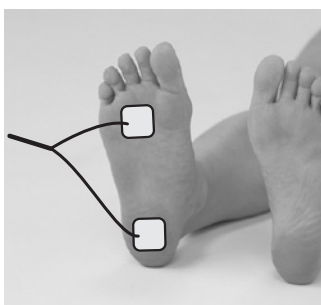

- 痛みのある部位をはさむ様にしてパッドを貼ってください。
- この時パッドが重なり合わないようになしてください。

Q&A・故障かな?と思ったら

Q1：電源が入らないときは？

A：リチウムイオン充電機が入っているかをご確認ください。また、本体・リチウムイオン充電機・充電器それぞれの端子部分が汚れていないこと、キーロックがされていないかを確認してください。汚れている際には綿棒等でふきとってください。それでも電源が入らない場合、リチウムイオン充電機を外して再度セットしてみてください。

* 確認後も変化がない場合は故障の可能性があります。
お求めの販売店にご連絡ください。

Q2：粘着パッドがはがれてしまったときは？

A：粘着パッドは、乾燥してくると粘着力が低下します。ご使用後、水を1～2滴つけて保管すると回復することがあります。なお、粘着パッドは消耗品です。粘着力が低下しましたら交換してください。

* 粘着パッドの追加注文は、お求めの販売店にご連絡ください。

Q3：体感はないのですか？

A：メディボックスは微弱な電流を使用しているため、体感（刺激）はほとんどありません。

製造販売元



伊藤超短波株式会社

埼玉県川口市栄町3-1-8 TEL.048 (254) 1011 (代表)

<http://www.itolator.co.jp/>